



Gebrauchsanweisung

PAX Tragetuch mit Durchrutschsicherung L

Artikelnummer: 102260201



Gebrauchsanweisung

PAX Tragetuch mit Durchrutschsicherung L

Artikelnummer: 102260201




Für die sichere Anwendung dieses Produktes lesen und beachten Sie bitte, vor dem Erstgebrauch, diese Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung gilt für folgendes Produkt

Handelsname: PAX Tragetuch mit Durchrutschsicherung L
Artikelnummer: 102260201

Zweckbestimmung

Das PAX Tragetuch mit Durchrutschsicherung L ist ein Tragetuch nach DIN EN 1865-1. Es ist für Rettung und Transport von verletzten und / oder erkrankten Personen vorgesehen.

Darstellung

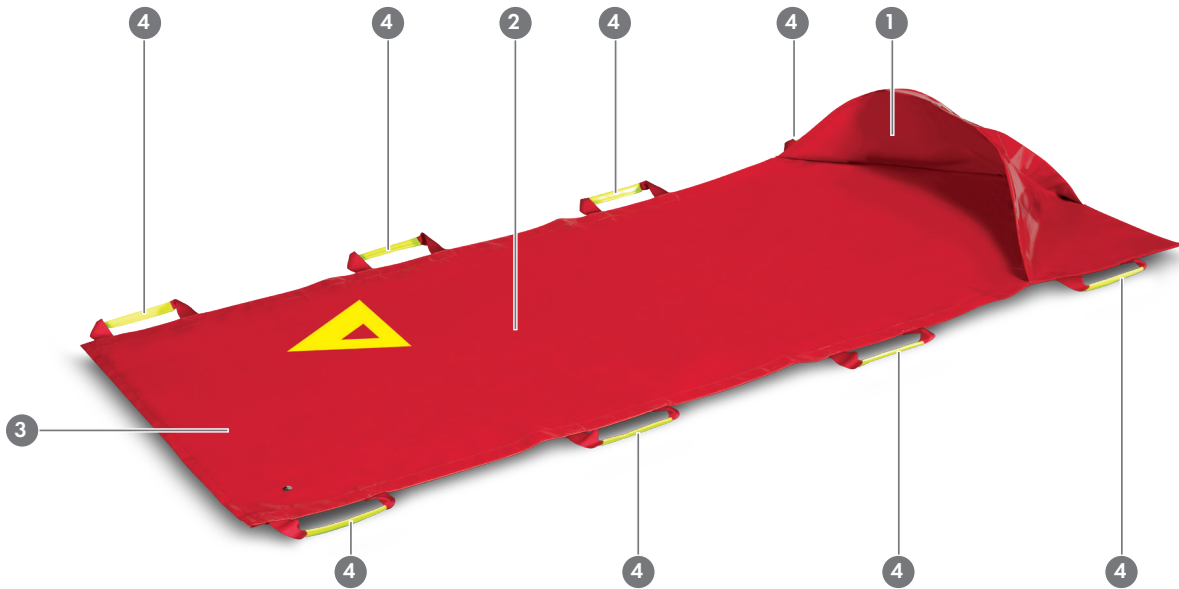

- 1 Fußsack als Durchrutschsicherung
- 2 Tragetuch - Liegefläche Patient
- 3 Tragetuch - Kopfende
- 4 Tragegriffe

MD Bestimmungsgemäße Anwendung

①.

Legen Sie das Tragetuch auf eine ebene und saubere Fläche und breiten dieses komplett aus. Dabei liegt die Seite mit den Gurtbändern nach unten.



ACHTUNG:

Spitze und scharfe Gegenstände (z. B. Scherben, spitze Steine, etc.) können die Oberfläche des Tragetuches beschädigen.

②.

Wenn möglich, bereiten Sie den Patienten auf das Umlagern auf das Tragetuch vor. Für die Umlagerung halten Sie sich an die aktuellen medizinischen Leitlinien.

③.

Lagern Sie den Patienten in der gewünschten Position auf das Tragetuch. Unter dem Patienten muss das Tragetuch faltenfrei sein.

Achten Sie dabei auf die medizinisch korrekte Position und auf eventuelle Verletzungen des Patienten.

Für die ordnungsgemäße Umlagerung und Lagerung des Patienten halten Sie sich an die aktuellen medizinischen Leitlinien.



ACHTUNG:

Das Ende mit der Durchrutschsicherung ① ist das Fußende des Tragetuches.

④.

Legen Sie die Füße des Patienten in die dafür vorgesehene Durchrutschsicherung ① am Fußende.

⑤.

Wenn möglich, nutzen Sie alle 8 Tragegriffe ④ an dem Tragetuch, um einen schonenden und achsengerechten Transport des Patienten zu ermöglichen.

⑥.

Der Patient ist im Tragetuch transportbereit.

Anwendergruppe

Bei dem PAX Tragetuch mit Durchrutschsicherung L handelt es sich um ein Medizinprodukt, das nur von eingewiesenem und regelmäßig auf das Produkt geschultem Fachpersonal angewendet werden darf.
Für die Durchführung der Einweisung ist der Betreiber und der Anwender des Medizinproduktes verantwortlich.
Die Art und Indikation der Anwendung richten sich nach den aktuellen, allgemein anerkannten medizinischen Richtlinien und Empfehlungen der entsprechenden Fachgesellschaften.

Wird das Produkt vom Betreiber für die Gruppe der vorgesehenen Anwender als selbsterklärendes Produkt eingestuft, so ist dies vom Betreiber in geeigneter Form zu dokumentieren (z.B. Risikoanalyse).

Eine grundsätzliche Einstufung des Produktes durch den Hersteller als selbsterklärend ist nicht möglich, da dies immer abhängig von der vorgesehenen Anwendergruppe ist.



Bei der Anwendung des PAX Tragetuch mit Durchrutschsicherung L sind folgende Handhabungsbedingungen besonders zu beachten:

- Offene Wunden oder nicht intakte Hautareale sind nach den aktuellen Empfehlungen zur aseptischen Wundbehandlung zu versorgen und steril abzudecken.
- Überprüfung der Unversehrtheit der Gurte, Griffe und der Liegefläche vor jeder Anwendung.
- Zusätzliches sichern des Patienten während des Transportes in einem Fahrzeug mit dem jeweiligen Rückhaltesystem der Patiententrage.

Vor der ersten Anwendung die Verpackungs-Hülle entfernen und das Tragetuch auseinanderfalten.



**Auf gleichmäßige Belegung der Tragegriffe achten.
Das Gewicht des Patienten muss auf dem PAX Tragetuch mit Durchrutschsicherung L gleichmäßig verteilt sein**



Beachten Sie die für Sie geltenden Arbeitsschutzrichtlinien bei der Anwendung des PAX Tragetuch mit Durchrutschsicherung L

Das Produkt ist zur mehrfachen Anwendung, nach sachgerechter Wiederaufbereitung, vorgesehen.

Es kann in einem Temperaturbereich von -30°C - +70°C angewendet werden.

Vorgesehene Patientenzielgruppen

- Jugendliche und Erwachsene
- Kinder und Schulkinder
- Produkt weist keine Geschlechtsspezifität auf

Anwendung bei Kindern, schwangeren oder stillenden Frauen

Die Anwendung des PAX Tragetuch mit Durchrutschsicherung L bei diesen Patientengruppen bedarf keiner besonderen Vorsichtsmaßnahmen.

Bei der spezifischen Behandlung sind die Therapieempfehlungen der entsprechenden Fachgesellschaften zu beachten. Dies kann insbesondere die Lagerung von schwangeren Frauen betreffen.

Anwendungsbeschränkungen / Kontraindikationen

Patienten, die zur Behandlung immobilisiert werden müssen, dürfen nicht mit dem PAX Tragetuch mit Durchrutschsicherung L gerettet oder transportiert werden. In diesem Fall sollte eine Immobilisation mit einem dafür vorgesehenen Transportmittel erfolgen.

Das Produkt ist für die Anwendung bei einem Patienten bis maximal 150 kg Körpergewicht vorgesehen.

Etwaige unerwünschte Nebenwirkungen bei Anwendung des Produktes

Unerwünschte Nebenwirkungen sind bei bestimmungsgemäßer Anwendung des Produktes nicht zu erwarten.



SICHERHEITSHINWEISE

**Das Produkt hat keine lebenserhaltende oder lebensunterstützende Wirkung!
Das Produkt darf nur in ordnungsgemäßem und unbeschädigtem Zustand
angewendet werden.**

Maßnahmen bei Fehlfunktionen oder Leistungsveränderungen des Produktes

Sollte das PAX Tragetuch mit Durchrutschsicherung L Beschädigungen aufweisen, so ist dieses gegen ein intaktes Tragetuch auszutauschen. Kontaktieren Sie den Hersteller vor einer weiteren Nutzung des beschädigten Tragetuches.

Medizinprodukte, die gemeinsam mit dem PAX Tragetuch mit Durchrutschsicherung L angewendet werden können

Das PAX Tragetuch mit Durchrutschsicherung L kann bei bestimmungsgemäßer Anwendung mit allen zum Patiententransport oder zur Patientenlagerung zugelassenen Medizinprodukten kombiniert werden.

Als Beispiele hierfür gelten: Krankentrage, Schaufeltrage, Vakuummatratze, Spineboard / Langes Wirbelsäulenbrett, Helikoptertrage, Krankenbett, Röntgentisch, Ambulanzliege usw. (Liste nicht abschließend – bei fraglicher Kombinationsmöglichkeit bitte Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen).



Hinweise zu Einschränkungen bei der Kombination von Medizinprodukten und Zubehör zu Medizinprodukten mit dem PAX Tragetuch mit Durchrutschsicherung L

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung des Produktes sind keine Einschränkungen bei der Kombination mit Medizinprodukten und Zubehör zu Medizinprodukten zu erwarten.

Hinweise zur ordnungsgemäßen Installation des Medizinproduktes vor Inbetriebnahme

Vor der ersten Nutzung entnehmen Sie das PAX Tragetuch mit Durchrutschsicherung L aus dem Verpackungskarton und entfernen Sie die Verpackungs-Hülle.

Hinweise auf eine besondere Behandlung / Vorbereitung des Medizinproduktes vor der Anwendung

Das PAX Tragetuch mit Durchrutschsicherung L muss vor der ersten und allen weiteren Anwendungen am Patienten gemäß den Angaben unter Wiederaufbereitung - Reinigung und Pflege / Desinfektion aufbereitet werden.

Überprüfung des sicheren und betriebsbereiten Zustandes des Medizinproduktes

Unmittelbar vor Anwendung des PAX Tragetuch mit Durchrutschsicherung L muss dieses durch eine Sichtkontrolle auf einen einwandfreien technischen und hygienischen Zustand hin überprüft werden.

Dies gilt insbesondere für sachgerecht wiederaufbereitete Produkte.

Beschädigte Produkte müssen umgehend ausgetauscht werden.



Als sofortige Maßnahme bei vermuteter oder offensichtlicher Beschädigung des PAX Tragetuch mit Durchrutschsicherung L darf dieses Medizinprodukt nicht angewendet werden und muss umgehend gegen ein funktionsfähiges Tragetuch ausgetauscht werden.

Hinweise zu eventuellen wechselseitigen Störungen bei Untersuchungen und Behandlungen

Das PAX Tragetuch mit Durchrutschsicherung L ist durchlässig für Röntgenstrahlung und nicht magnetisch und kann daher auch während der Durchführung einer Röntgenuntersuchung, Computertomographie oder Magnetresonanztomographie unter dem Patienten belassen werden.

Bei der Durchführung von Röntgenuntersuchungen, Computertomographien oder Magnetresonanztomographien kann es durch Interaktionen zu einer Einschränkung der Aussagekraft der Untersuchungen und Artefakten kommen.

Bei der Durchführung von EEG, EKG oder Ultraschalluntersuchungen sind bei bestimmungsgemäßer Anwendung keine wechselseitigen Störungen zu erwarten.



Instandhaltungsmaßnahmen

Unter Instandhaltungsmaßnahmen sind insbesondere Inspektionen und Wartungen zu verstehen, die erforderlich sind, um eine sichere und ordnungsgemäße Anwendung der Medizinprodukte fortwährend zu gewährleisten.

Inspektion und Wartung

Das PAX Tragetuch mit Durchrutschsicherung L ist regelmäßig auf Beschädigung und Funktion zu überprüfen. Weitere Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch den Betreiber oder Anwender sind vom Hersteller nicht vorgesehen.

Reparaturen und Instandsetzung

Die Instandsetzung von Medizinprodukten umfasst insbesondere die Reparatur zur Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit. Aus Gründen der Produkthaftung und Sicherheit dürfen Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten nur durch autorisierte Fachbetriebe, unter Verwendung von Original-Ersatzteilen, durchgeführt werden. Bei möglicherweise durchzuführenden Reparaturen oder Instandsetzungsmaßnahmen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Wiederverwendbarkeit

Das Produkt kann bei erhaltener Funktion und unbeschädigtem Material wiederverwendet werden. Vor einer erneuten Anwendung muss sich der Anwender vom ordnungsgemäßen Zustand des Produktes überzeugt haben. Es dürfen nur Produkte in technisch und hygienisch einwandfreiem Zustand erneut angewendet werden. Bei Anzeichen von Materialabnutzung oder Materialermüdung darf das Produkt nicht wiederverwendet werden.

Wiederaufbereitung - Reinigung und Pflege

Das PAX Tragetuch mit Durchrutschsicherung L kann mit Wasser und einer Seifenlösung grob gereinigt werden. Eine extreme mechanische Reinigung, die zur Beeinträchtigung des Oberflächenmaterials führen kann, ist zu vermeiden.

Wiederaufbereitung - Desinfektion

Eine Desinfektion des PAX Tragetuch mit Durchrutschsicherung L, in Form einer Oberflächen-Wischdesinfektion, ist mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln der Substanzklassen der Alkohole, Aldehyde und Amine möglich. Bei der Verwendung von anderen Substanzklassen kann es zu irreversiblen Beschädigungen der Oberfläche und des Materials kommen, was wiederum die Leistungsfähigkeit und Sicherheit des Produktes beeinflussen kann. Keine Lösungsmittel verwenden!
Bei Fragen zur Anwendbarkeit spezieller Desinfektionsmittel kontaktieren Sie bitte den Hersteller.

LIEFERUMFANG

Handelsname: PAX Tragetuch mit Durchrutschsicherung L

Artikelnummer: 102260201

- PAX Tragetuch mit Durchrutschsicherung L



Technische Spezifikationen des Produktes

Das PAX Tragetuch mit Durchrutschsicherung L entspricht den Anforderungen der EN 1865-1 für Tragetücher.

Technische Angaben / Leistungsmerkmale des Produktes

Länge:	198 cm
Breite:	81 cm
Höhe:	1 cm
Gewicht:	ca. 2,10 kg
Maximale Belastbarkeit:	150 kg
Betriebstemperatur:	-30°C - +70°C
Material:	PAX-Plan
Farbe:	Rot

Regulatorische Angaben zum Produkt

Registrierung DE – DMIDS:	DE/CA11/895-4047
Registrierung UK – MHRA:	2024072901378085
UMDNS:	15-693
EMDN:	n.a.
GMDN:	13818
UDI-DI:	426074548 2066

Lagerung

Das Produkt kann im Rettungsmittel in einem Temperaturbereich von -30°C - +70°C gelagert werden. Für eine Langzeit – Lagerung empfiehlt sich zur Materialschonung Raumtemperatur.

Begrenzung der Nutzungsdauer

Eine Begrenzung der Nutzungsdauer ist bei bestimmungsgemäßer Anwendung, erhaltener Funktionsfähigkeit und einwandfreiem hygienischen Zustand nicht vorgesehen.

Angaben zur sachgerechten Entsorgung des Medizinproduktes

Nach einer ordnungsgemäß durgeführten Desinfektion kann das Medizinprodukt im Restmüll entsorgt werden. Bitte beachten Sie Ihre lokalen Vorgaben zur Entsorgung von medizinischen Abfällen und Restmüll.

- Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.
- Fragen Sie bitte bei der Stadt- / Gemeindeverwaltung nach örtlichen Entsorgungsunternehmen.

Angaben zur sachgerechten Entsorgung der Verpackung

- Die Produkt - Verpackung kann der Wertstoffwiederverwendung zugeführt werden.
- Metallteile können der Altm Metallverwertung zugeführt werden.
- Kunststoffteile können der Kunststoffverwertung zugeführt werden.
- Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.
- Fragen Sie bitte bei der Stadt- / Gemeindeverwaltung nach örtlichen Entsorgungsunternehmen.

Gewährleistung

Für dieses Produkt übernimmt der Hersteller die Gewährleistung, entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen. Diese erstreckt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler. Hiervon ausgeschlossen sind Verschleißteile und Teile / Baugruppen, die einer bestimmungsgemäßen Abnutzung unterliegen sowie Schäden, die sich als Folge übermäßiger Beanspruchung, nicht-bestimmungsgemäßer Anwendung, gewaltsamer Beschädigung oder unzulässiger Änderung / Instandsetzung ergeben.

Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte an den Hersteller.



SICHERHEITSHINWEIS

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle müssen unverzüglich dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates, in dem der Anwender und / oder der Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.



HERSTELLER:
X-CEN-TEK GmbH & Co. KG

**Westerburger Weg 30
D-26203 Wardenburg
Deutschland**

**Tel.: +49 (0) 44 07 - 7 14 76 0
Fax: +49 (0) 44 07 - 7 14 76 99**

**Email: info@pax-bags.de
Internet: www.pax-bags.com**



**Dieses Produkt ist konform mit den
Grundlegenden Anforderungen
des Anhang I der EG-Verordnung 2017/745
für Medizinprodukte / MDR**

CH

REP

**MK-Med Medizintechnik AG
Industriezone Basper 33
CH-3942 Raron
CHRN-AR-200003155**

UK

REP

**PAX – bags UK Ltd.
Merlin House, No.1 Langstone Business Park,
Priory Drive
NP18 2HJ Newport - UK**

Technische Änderungen vorbehalten

Die Inhalte dieser Gebrauchsanleitung sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwendung, auch auszugsweise, bedarf der schriftlichen Genehmigung.



X-CEN-TEK GmbH & Co. KG

Westerburger Weg 30
26203 Wardenburg
Deutschland

Tel.: +49 (0)44 07 - 7 14 76 - 0
Fax: +49 (0)44 07 - 7 14 76 - 99
E-Mail: info@pax-bags.de



www.pax-bags.com

